

Notice d'utilisation

Masques barrières

Des types MK1 / MK2 / MK3 / MK4



Instructions de mise en place

1. Avant de mettre l'équipement, assurez que vos mains soient propres,
2. Inspectez le masque pour l'absence de tout dommage avant mise en place,
3. Dépliez totalement les deux pans (ouvertures auriculaire),
4. Positionnez le masque devant le nez et la bouche,
5. Le haut du masque doit être à mi-hauteur du nez,
6. Le bas du masque doit couvrir le bas du menton,
7. Insérez les oreilles dans les ouvertures auriculaires
8. Positionnez le pourtour des ouvertures à plat derrière l'oreille (sans plis du média),
9. Ajustez le masque sur le visage,
10. Remplacez le masque après 4 heures d'utilisation (soit 2 masques par jour de travail),
11. Pour le retirer, extraire le masque par les ouvertures auriculaires,
12. Votre masque est individuel, ne pas le prêter en toute circonstance.

Entretien – Lavage

Masque lavable en machine à laver – Lessive habituelle sans adoucissant - Ne pas stériliser.

- Concernant le modèle MK3 veuillez nouer les cordons ensemble avant le lavage,
- Mode éco ou express à température de 60°C, durée 30 minutes minimum,
- Sécher le masque mécaniquement (sèche-linge),
- Nombres de lavages : 5 cycles de lavage/séchage, (8 cycles possible pour le MK1)
- Ranger les masques propres dans un emballage hermétique entre 2 utilisations.